



1. Подгответе всички необходими материали: иглата за взимане на кръв /вакуета/, холдер, вакуум епруветка, алкохолни тампони, ръкавици и лента за стягане (турникет).

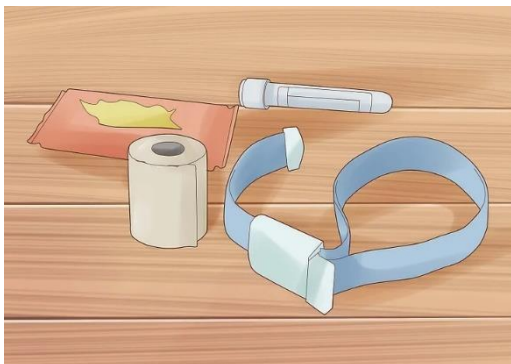


2. Уверете се, че работното място е чисто и дезинфекцирано. Поставете необходимите материали на достъпно място.
3. Измийте ръцете си със сапун и вода или използвайте средство за дезинфекция на ръцете, за да намалите риска от инфекция.




4. Сложете си ръкавици, за да осигурите чиста среда и защита от евентуален контакти с кръвта на пациента.
5. Идентифицирайте подходяща вена на пациента, от която ще вземете кръв. Използвайте турникет, за да помогнете на вената да изпъкне и да стане по-лесно извършването на пункцията.

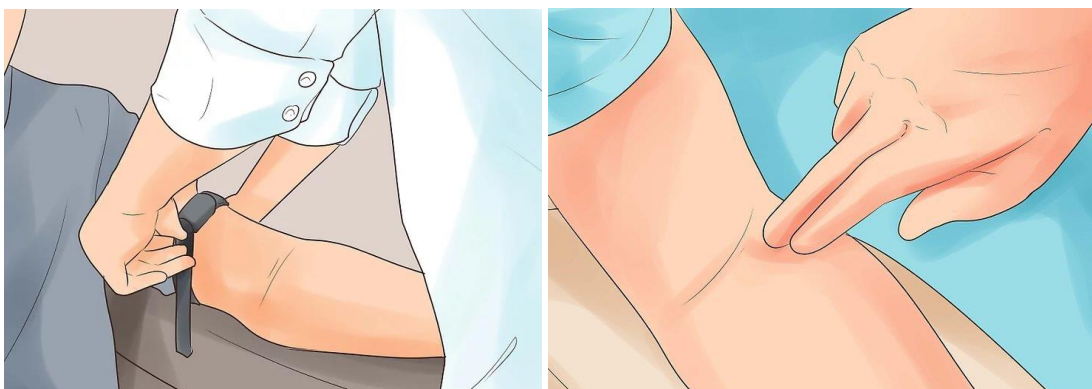


6. Почистете областта около вената, където ще извършите пункцията, с помощта на алкохолен тампон или друго антисептично средство. Оставете областта да изсъхне.

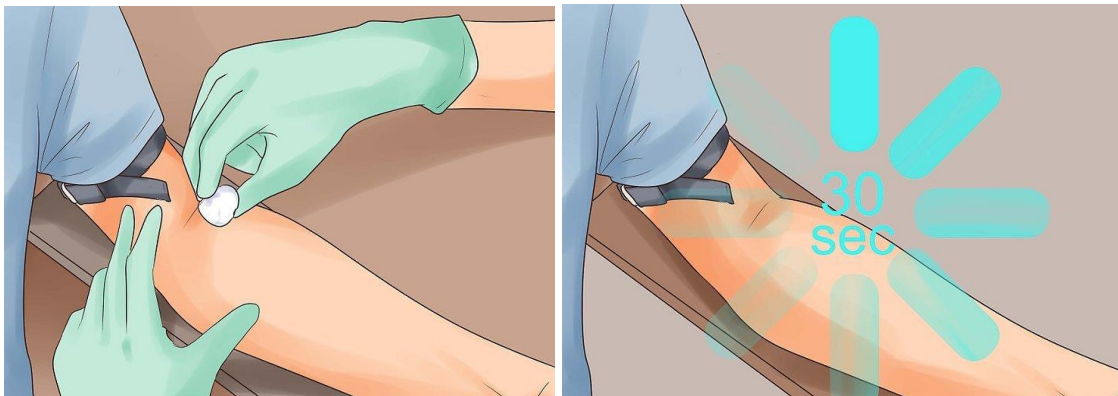


7. Вземете иглата за събиране на кръв и я поставете с острието над вената. Наклонете иглата под ъгъл от около 15-30 градуса спрямо кожата.
8. Поставете внимателно иглата във вената. Ще почувствате леко съпротивление, когато иглата влезе във вената.

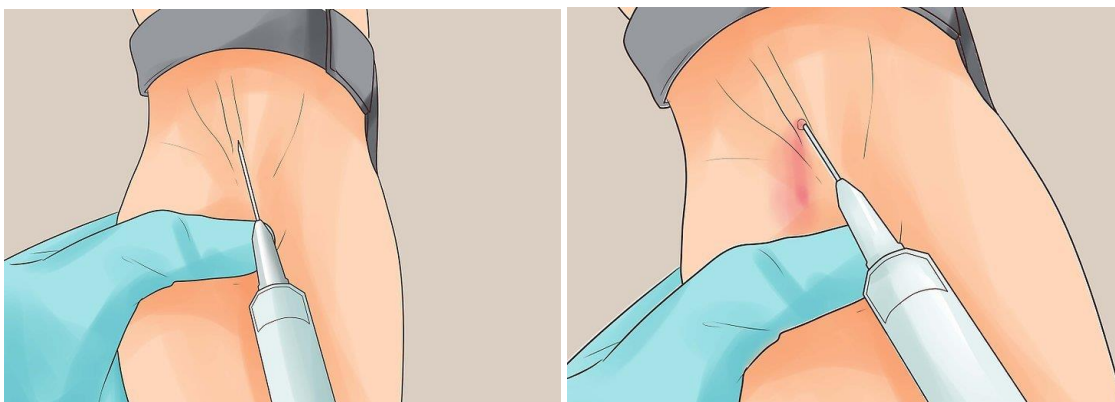

9. Свържете холдера с иглата и вакуум епруветката и изчакайте, докато кръвта запълни епруветката. Ако използвате повече от една епруветка, след като първата е пълна, поставете нова епруветка, без да изваждате иглата от вената.

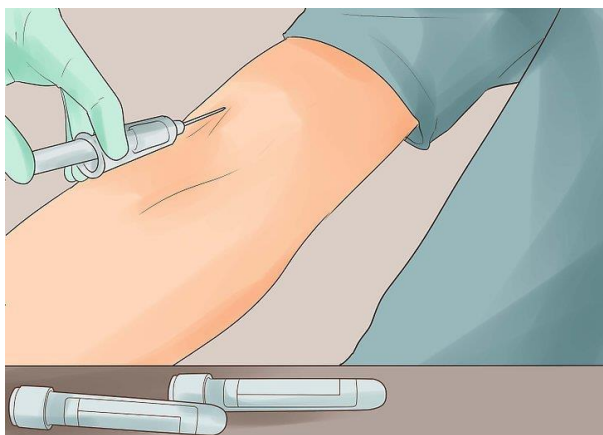

10. Когато приключи процедурата, внимателно изтеглете иглата от вената и натиснете мястото на пункцията с алкохолен тампон. Поставете превръзка или марля, за да спрете кръвотечението.

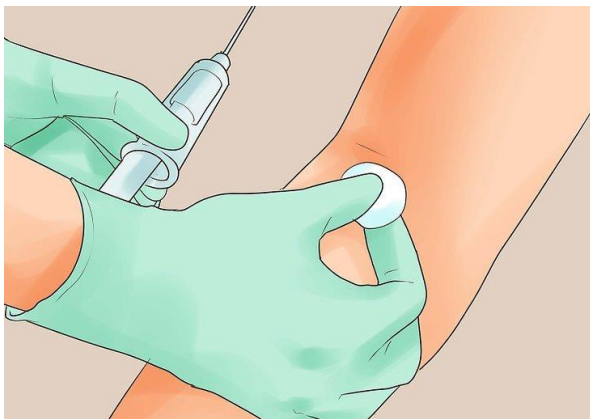

11. Изхвърлете използваната игла в специален контейнер за опасни отпадъци, предназначен за игли и остриета, спазвайки необходимите мерки за безопасност.

